

Тест-комплект Dräger DrugTest® 5000

Система Dräger DrugTest® 5000 состоит из двух основных компонентов: тест-комплектов Dräger DrugTest® 5000 и анализатора Dräger DrugTest® 5000.



Она обеспечивает быстрый, точный анализ образцов слюны на такие наркотические вещества, как амфетамины, метамфетамины, опиаты, кокаин и метаболитические продукты, бензодиазепины и каннабиноиды, а также точную диагностическую оценку и управление данными.

Инновационный комплект эргономичной конструкции, простой в применении и всегда готовый к работе, основным элементом которого является тест-кассета в комплекте с коллектором. Возможность манипулирования левой или правой рукой, в перчатках или без них позволяет беспрепятственно использовать прибор и исключает любое неверное толкование результатов проверки, гарантируя вывод на дисплей только точного результата. Устройство изготовлено из твердого пористого материала, обладающего капиллярными свойствами, а технология теста, исключая контакт с образцом и его компонентами, обеспечивает гигиеничность процедуры.

Минимизация риска ошибки оператора – тест выполняется в пять простых этапов.

Прежде всего, снимите защитную крышку с коллектора слюны и передайте тест-кассету проверяемому.

Затем проверяемый собирает пробу слюны, двигая коллектор во рту из стороны в сторону между щекой и десной. После накопления достаточного количества слюны встроенный индикатор окрашивается в синий цвет и тест-кассету можно передать оператору. Контролирующий процесс оператор помещает тест-кассету и картридж пробоподготовки в анализатор и ожидает результата, выводимого на дисплей через несколько минут.

Образцы легко идентифицируются – фамилия и дата записываются прямо на корпусе тест-кассеты. При необходимости повторного отбора пробы, хранения и транспортировки с целью анализа в лабораторных условиях Dräger DrugTest® 5000 используется в комбинации с устройством сбора слюны Dräger DCD 5000.



Портативный тест-комплект Dräger DrugTest® 5000:

простое, быстрое, надежное и гигиеничное обнаружение наркотиков.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА


Каждый тест-комплект Dräger DrugTest 5000 включает один коллектор в индивидуальной упаковке, тест-кассету и картридж пробоподготовки	
Учебный тест-комплект Dräger DrugTest 5000	83 19 970
Тест-комплект Dräger DrugTest 5000 с панелью для обнаружения 6 видов наркотиков	83 19 830
Тест-комплект Dräger DrugTest 5000 с панелью для обнаружения 6 видов наркотиков (версия панели для США)	83 19 965
Тест-комплект Dräger DrugTest 5000 с панелью для обнаружения 2 видов наркотиков	83 19 990*
Тест-комплекты упакованы по 20 штук	

Принадлежности

Устройство для сбора проб оральной жидкости Dräger DCD 5000	83 19 910
---	-----------


* в стадии разработки (предоставляется по запросу)

DRÄGER DRUGTEST 5000 – ТЕСТ ВЫПОЛНЯЕТСЯ В ШЕСТЬ ПРОСТЫХ ЭТАПОВ

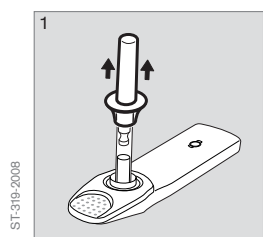


ST-319-2008

Снимите защитную крышку

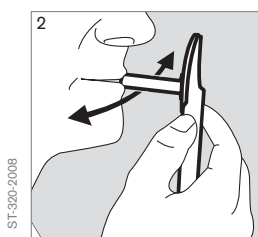


ST-320-2008

Вставьте коллектор в рот

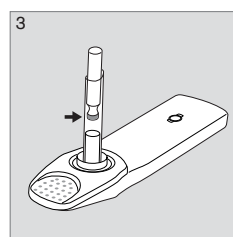


ST-321-2008

Индикатор окрасится в синий цвет

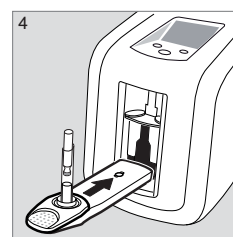


ST-322-2008

Поместите тест-кассету и картридж пробоподготовки в анализатор

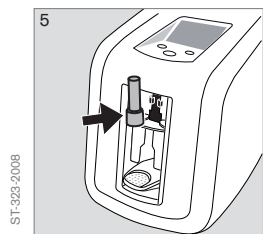

ST-323-2008

Результат выводится на дисплей

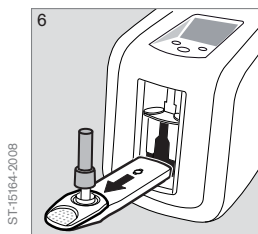

ST-15164-2008

После появления результата на дисплее достаньте тест-кассету

Хранение и срок годности

Храните тест-комплект при температуре от 4 до 30 °C в оригинальной пленочной упаковке. Не используйте тест-комплект, упаковка которого имеет повреждения, например, дыры или разрывы. Используйте тест-комплект непосредственно после вскрытия упаковки. Запрещается использовать тест-комплект по истечении срока годности, указанного на упаковке.